

Bardum

Bruksanvisning Monoski/Snowball



Innhold

1. Innledning.....	2
2. Levering	2
3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt.....	2
4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang.....	3
5. Sikkerhetsinformasjon.....	3
6. Oppbygging av Monoski/Snowball.....	4
7. Justering av fotbøylene	5
8. Setet	5
9. Montering av rammen til skien	6
10. Stolheis	7
11. T- krok og skålheis	8
12. Kontaktinformasjon.....	9

1. Innledning

Takk for at dere har valgt en Prashberger Monoski/Snowball.

For å få størst glede av produktet i lengst mulig tid, anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye og følger sikkerhetsinstruksjonene.

2. Levering

Før levering sørger vi for at sitskien er i perfekt stand og pakker dem i spesielle bokser. Vi anbefaler imidlertid at du inspiserer sitskien umiddelbart etter mottak, fortrinnsvis i nærvær av transportøren, for å oppdage eventuelle skader.

Skulle du oppdager skade gjør som følger:

1) Skriv en skademelding

(Transportøren er forpliktet til å akseptere denne)

2) Signer et ansvarsskjema

(Du overfører da alle forpliktelser som følge av skaden til leverandøren)

3) Returner fraktbrevet, skader reservasjoner og overføring til NAV.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, eller om en materialfeil er varslet etter aksept av produktet, vil vi ikke kunne erkjenne skaden.

3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt

Monoski/Snowball er utformet i den hensikt å gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å kjøre på ski.

Sitskiene har blitt utviklet for bruk i preparerte eller forberedte skibakker/anlegg.

Monoski/Snowball skal kun benyttes på ordentlig markert skiløyper!

4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang

Før du bruker Monoski/Snowball for første gang bør du lese brukerhåndboken nøye.


Vi anbefaler å ta et sitskikurs hvor du vil få grunnopplæring på hvordan du skal bruke utstyret.

Vennligst kontakt Bardum for datoer og klokkeslett for disse kursene.

5. Sikkerhetsinformasjon

- Forlat aldri merkede skiløyper
- Før hver bruk, sjekk alltid at sitskien er fri for skader (sprekker, løse skruer, seler, osv.)
- Følg alltid reglene i bakken.
- Tilpass din kjørestil til dine evner
- Ha sitskien inspisert av et autorisert verksted jevnlig
- Følg vedlikeholdrådene som ligger på våre hjemmesider www.bardum.no


6. Oppbygging av Monoski/Snowball

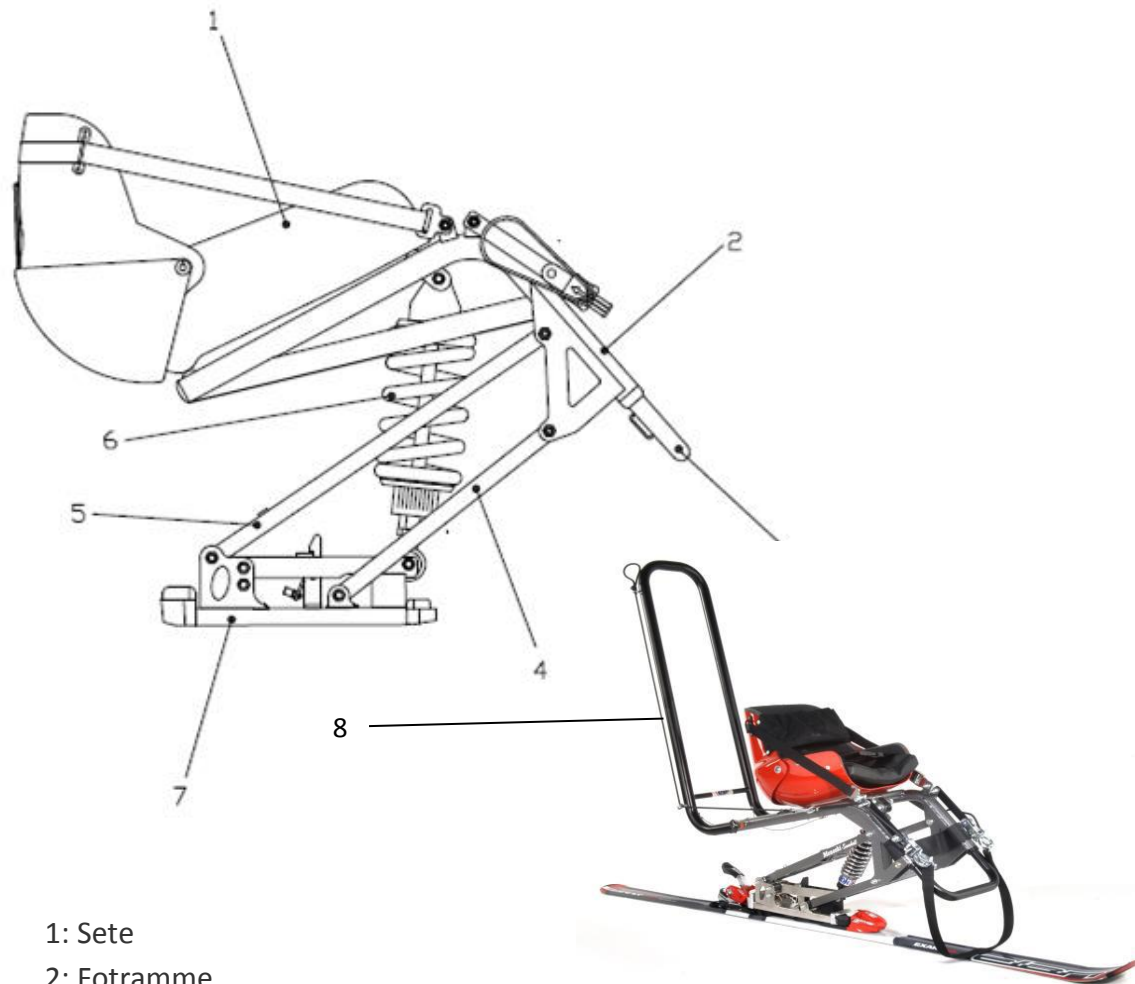

- 1: Sete
- 2: Fotramme
- 3: justerbar fotbøyle
- 4: Front stag
- 5: Bak stag
- 6: Demper
- 7: Støvel
- 8: Ledsager bøyle

7. Justering av fotbøylen

Løsne skruene i flere omganger med 4 mm umbrakonøkkel. Skruene skal kun løsnes, ikke skrues helt ut. Plasser stighbøylen i ønsket posisjon og lås skruene.

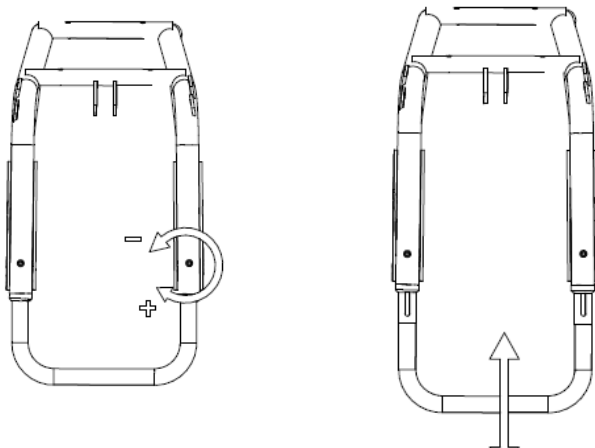

8. Setet

Setet er tilgjengelig i ulike bredder og lengder. Valg av riktig setestørrelse er viktig i forhold til å få best effekt av skien. Setet skal være like godt tilpasset som en alpinstøvel til en stående utøver.

Sjekk at mage-, lår- og fotrem ikke er skadet før du begynner å kjøre. Remmene skal være tett festet.


Setet er festet til rammen med fire skruer. Går over disse med jevne mellomrom og stram til dersom skruene er løse.

9. Montering av rammen til skien


Rammen blir festet til skien på samme måte som en alpinstøvel blir festet til skien med alpinbindinger. Vi anbefaler at du kjøper ski og bindinger gjennom oss slik at disse er tilpasset sitski kjøring.

For å feste sitskien til skien gjør du følgende:

- Fjern snø og is fra støvelen og bindingen.
- Før fronten på støvelen inn i bindingen i en vinkel på ca. 45°

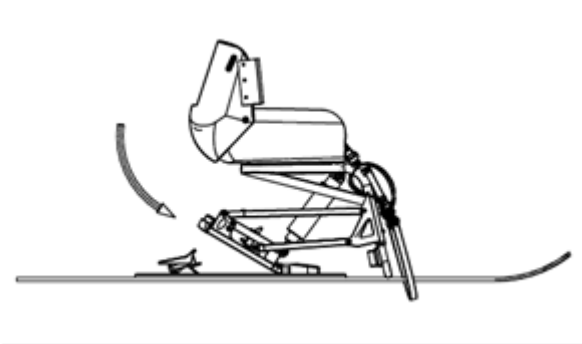

- Trykk sitskien ned i bakkant slik at «støvelen» presses ned i bakre del av bindingen.

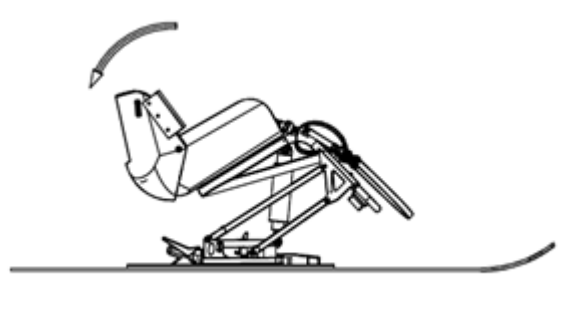

- Se til at bindingen har gått i lås ved at bakre del av bindingen spretter opp. Støvelen skal da ikke kunne rikes i bindingen.


Merk: Bindinger som brukes til sitski er tilpasset for sitskikjøring og skal ikke brukes av stående utøvere da dette kan føre til alvorlige skader.

Før sitskien tas i bruk må utøver sjekke at bindingen er i orden og ikke er skadet.

10. Stolheis

Før du kommer frem til heisen gjøres følgende:

- Løsne ryggen slik at du kan lene deg bakover. Du må lene deg bakover for at sikkerhetsbøylen i heisen skal komme over deg og sitskien.

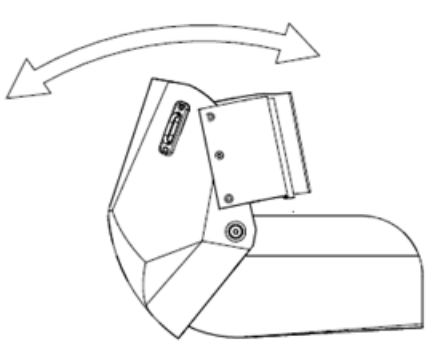

- Åpne spaken som låser setet til rammen. Denne er plassert ved støvelen på sitskien.



- Hev deg opp i stolheis posisjon ved hjelp av krykkestaver eller ved å heise opp ledsagerbøylen
- Du er i heisposisjon når sitskien står i denne posisjonen



Når du skal av heisen må du gjøre følgende:

- Forbered å gå av heisen i god tid
- Sett eventuelle krykkeski i kjøreposisjon

- Skyv deg selv eller den du ledsager fra skiheisen med armene


Gi beskjed til heispersonalet dersom du er usikker på bruk av heisen. Heispersonalet er behjelpelig med å stoppe eller reduserer farten til heisen.

- Husk å lukke splinten som låser setet til rammen før du kjører ned
- Stram ryggen i kjørestilling

11. T- krok og skålheis


Før du tar T-krok eller skålheis sjekk alltid at heisutløseren fungerer og at remmen ikke er skadet. Dersom sitskien er ledsagerkjørt skal ledsager feste seg til kroken som er plassert på ledsagerbøylen, under setet.

Heisremmen hektes over T-kroken eller skålen. Heispersonalet kan hjelpe til med dette.

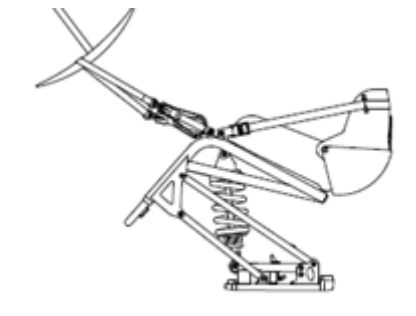

For å holde balansen skal eventuelle krykkestaver stå i kjøreposisjon. Dersom man har en ledsagerkjørt sitski kan man oppleve at sitskien letter fra underlaget i bratte partier. Ledsager skal da holde sitskien stabil i luften til terrenget blir slakere.

Før avstigningsfeltet må du forberede deg på å løse ut heisen. For å gjøre dette drar du i stroppen som vist på bildet.

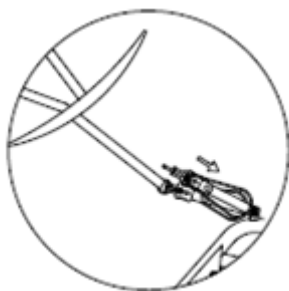

For sitski med ledsagerbøyle vil det være mulighet for å løse ut heisen også på ledsagerbøylene.

Forlat avstigningsfeltet på en effektiv måte for å gjøre plass til andre utøvere.

12. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til din nye sitski, ta kontakt med oss på tlf 64 91 80 60 eller via mail b@bardum.no.

Besøk også vår hjemmeside www.bardum.no

Informasjon om aktivitetsdager og kurs annonserer vi også via vår facebook side «Bardum».

Vi ønsker deg lykke til og håper du får mye glede av din nye sitski!

Hilsen

Bardum sitski team